



## Anwendung Provinoxx Körperdruck-Bewegungsmelder

### 1. Platzieren des Körperdruckbewegungsmelders

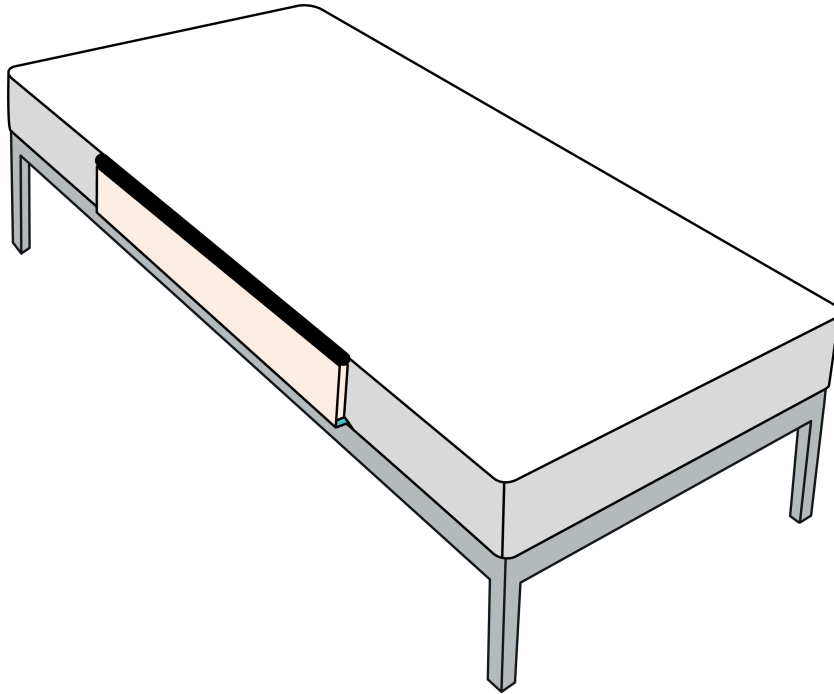

Die Plexiglasplatte des Körperdruckbewegungsmelders wird seitlich an der Stelle unter die Matratze geschoben, wo der Patient mit grösster Wahrscheinlichkeit aus dem Bett steigt. Es sollte kein Zwischenraum zwischen dem KDB und der Seite der Matratze bleiben.

### 2. Anziehen des Bettes mit montiertem Körperdruckbewegungsmelder

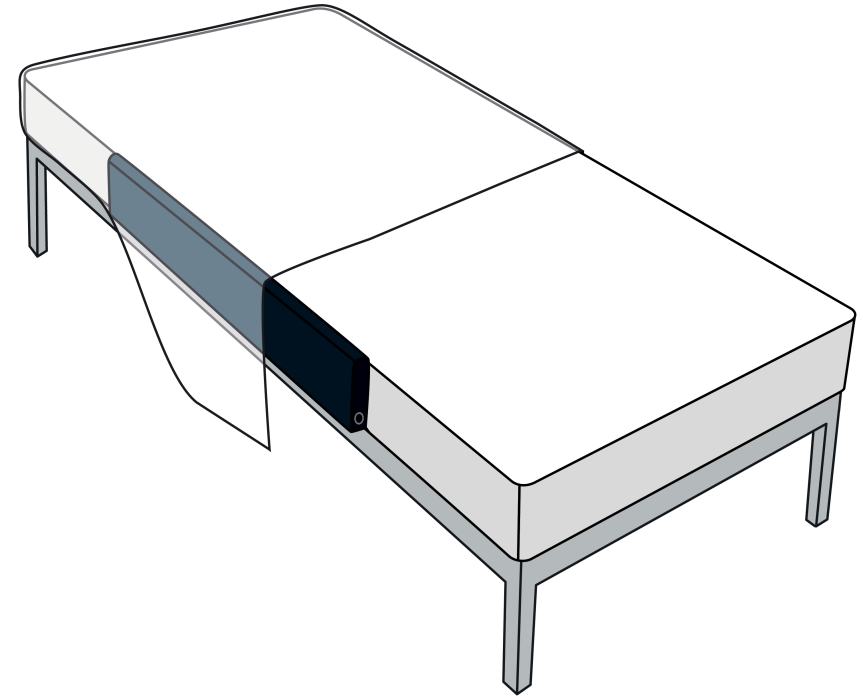

Zuerst muss die mitgelieferte Hülle über den KDB gezogen werden (Inkontinenzschutz). Anschliessend wird das Spannleintuch über den KDB gebettet, damit dieser für den Patienten nicht mehr sichtbar ist.



**Wichtig:** Das Patientensrufsystem wird erst ab einer Belastung von mehr als 7 kg aktiviert. Die maximale Belastung liegt bei ca. 150 kg.