



Installation Provinoxx Körperdruck-Bewegungsmelder

1. Glockenkabel trennen

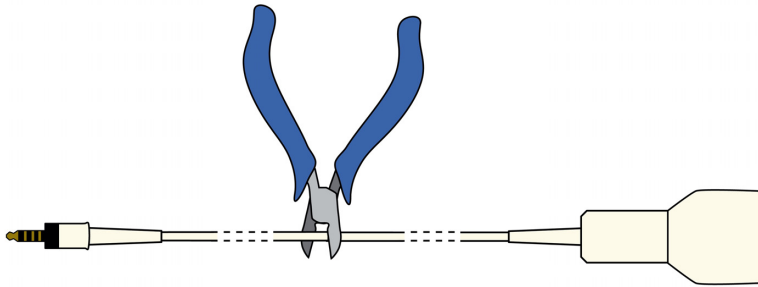


Das Kabel des herkömmlichen Patientenrufsystems mit Glocke dient dazu, den Körperdruckbewegungsmelder anzuschliessen. Die Glocke wird dafür mit einer Zange abgetrennt. Falls zusätzlich eine Patientenrufglocke erwünscht wird, besteht diese Option (siehe Punkt 3).

2. Stecker anbringen

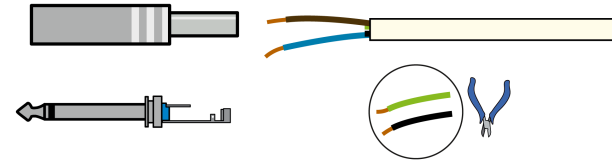

Stecker öffnen, Drähte freilegen, falls 4 Drähte vorhanden, nur Phase und Neutraleiter stehen lassen.

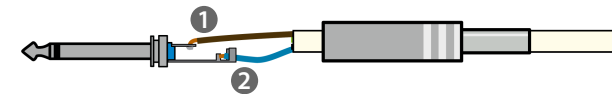

Phase an Position ① anlöten, Neutraleiter an Position ② anlöten.




Stecker wieder zuschrauben.



Wichtig:

Nur an herkömmliches Spital-Patientenrufsystem anschliessen (24 Volt).

3. Körperbewegungsmelder anschliessen

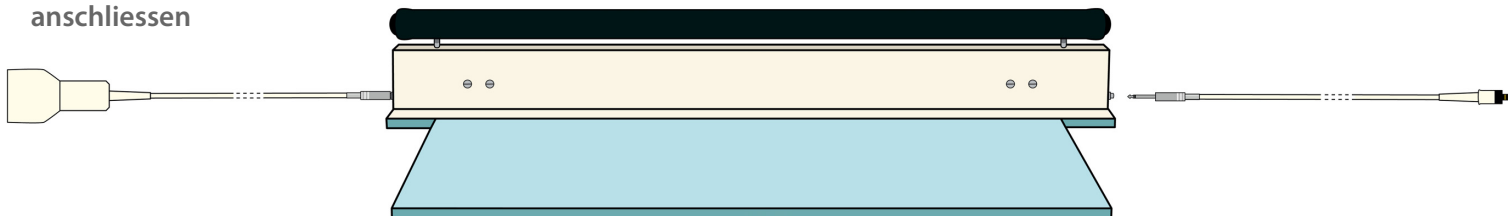

Der Körperdruckbewegungsmelder kann sowohl auf der rechten wie linken Seite an das Patientenrufsystem angeschlossen werden. Auf der freien Seite besteht zudem die Option zusätzlich eine Patientenrufglocke anzuschliessen.